

## 返蓝染色液说明书

### 【产品名称】

通用名称：返蓝染色液

英文名称：Dako Bluing Buffer

### 【包装规格】

1L

### 【预期用途】

用于调节苏木素的染色，从紫色变为蓝色。

### 【主要组成成分】

碱性返蓝缓冲液

每瓶 1000mL，可最少用于 3000 个玻片。

### 【储存条件及有效期】

室温保存。有效期 24 个月。

超过效期后请勿使用。涉及过夜时机载稳定性为 5 天。如果试剂在非规定的条件下存储，用户需要验证存储条件。没有明显迹象显示该产品的不稳定性。如果出现的异常结果不能归因于实验操作步骤的偏差，由此怀疑产品可能出现问题时，请及时联系 Dako 技术支持部门。

生产日期，失效日期：见标签。

### 【适用仪器】

组织染色机（Dako CoverStainer）

### 【样本要求】

1. 石蜡切片：福尔马林固定的石蜡包埋组织
2. 冷冻切片和细胞涂片：丙酮固定的冷冻切片或固定的细胞涂片

### 【检测方法】

依照组织染色机提供的伊红-苏木素染色（H&E）检测规程，染色完成后，切片需脱水，透明，封片。

更多信息及使用说明请参考 Dako 组织染色机（Dako CoverStainer）用户指南。

### 【检测结果的解释】

返蓝染色液蓝化苏木素染色结果。

### 【注意事项】

1. 仅用于体外诊断并仅供专业人员使用。
2. 穿戴合适的个人防护装置，以避免接触眼睛与皮肤。
3. 根据当地政府、国家或联邦的规范要求，对未使用的溶液进行处理。

### 【标识的解释】

 货号	 温度限值	 制造商
 体外诊断医疗器械	 批号	
 请参阅说明书	 有效期	

### 【基本信息】

备案人/生产企业：Dako Denmark A/S

住所：Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, Denmark

生产地址：Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, Denmark

联系方式

电话：+45 44 85 95 00

传真：+45 44 85 95 95

网址：www.dako.com

售后服务单位/代理人：安捷伦科技（中国）有限公司

售后服务单位/代理人住所：北京市朝阳区望京北路3号研发中心（一期）3层3-1至3-3室

联系方式：800-820-3278；400-820-3278

### 【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】

国械备 20151291

### 【说明书核准及修改日期】

核准日期：2017年08月26日

修改日期：2017年11月27日